

Methocel® 2%



ESTE FOLHETO INFORMATIVO CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES RELATIVAS AO MODO DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA DO PRODUTO. POR FAVOR, LEIA-O COM ATENÇÃO E CONSERVE-O PARA CONSULTA SEMPRE QUE NECESSITAR.

Descrição:

STERILE A

Solução para exames oftalmológicos com lentes de contacto. Fabricado em condições assépticas (a solução é esterilizada em autoclave e colocada em frascos em condições estéreis).

Composição:

hipromelose, ácido bórico, trometamol, cloreto de benzalcónio 0,1 mg/g (conservante) e água para injetáveis.

Propriedades:

Methocel® é uma solução de hipromelose isotónica com a lágrima incolor, transparente e de elevada viscosidade. Para a sua preparação é utilizada uma hipromelose de elevada pureza, garantindo um valor de viscosidade constante.

Indicações:

Methocel® é utilizado para preencher o espaço entre o olho e a lente de contacto no exame do fundo do olho com lâmpada de fenda, na gonioscopia ou determinadas terapêuticas oculares (por ex: trabeculoplastia com laser de argon).

Instruções de utilização:

A parte côncava da lente deve ser devidamente limpa e desinfetada antes de cada utilização.

Aplique uma a duas gotas na parte côncava da lente de contacto e aplique-a no olho como habitualmente.

Ao remover a lente de contacto, incline-a ligeiramente para evitar sucção. Após a remoção da lente de contacto, observe o olho à lâmpada de fenda para se certificar da integridade do epitélio.

As lentes de contacto de diagnóstico devem ser utilizadas exclusivamente por especialistas.

Restrições à utilização:

Hipersensibilidade a qualquer dos componentes.

Efeitos indesejáveis:

Após a utilização de lentes de contacto humidificadas com Methocel®, podem surgir, ocasionalmente e de forma transitória, situações de hiperémia e tumefação da conjuntiva.

Conservação:

Não utilize fora do prazo de validade impresso na cartonagem. Feche o frasco após cada utilização. Proteja o produto da luz colocando-o na caixa. Conserve a uma temperatura compreendida entre 5–25 °C. Após a abertura do frasco, utilize-o no prazo de três meses.

Nota:

A aplicação do Methocel® é facilitada se o frasco for armazenado com a tampa voltada para baixo.

Avisos:

Manter fora do alcance das crianças.

Apenas para uso externo. Não se destina a uso intraocular.

Apresentação:

Frasco de polietileno com conta-gotas em plástico contendo 30 g.

**Fabricado por:****OmniVision GmbH**

Lindberghstrasse 9

82178 Puchheim

Alemanha

Telefone: +49 89 84 07 92-30

Fax: +49 89 84 07 92-40

**Distribuído em Portugal por:****DAVI II - FARMACÊUTICA, S.A.**

Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B

Queluz de Baixo - 2730-055 Barcarena

Portugal

Data deste folheto:

Abril de 2020

**STERILE A**Referência: 21350
F-6087189B